




Screw Retained Restoration

For *Anker* Bone Level Implant System

中文版

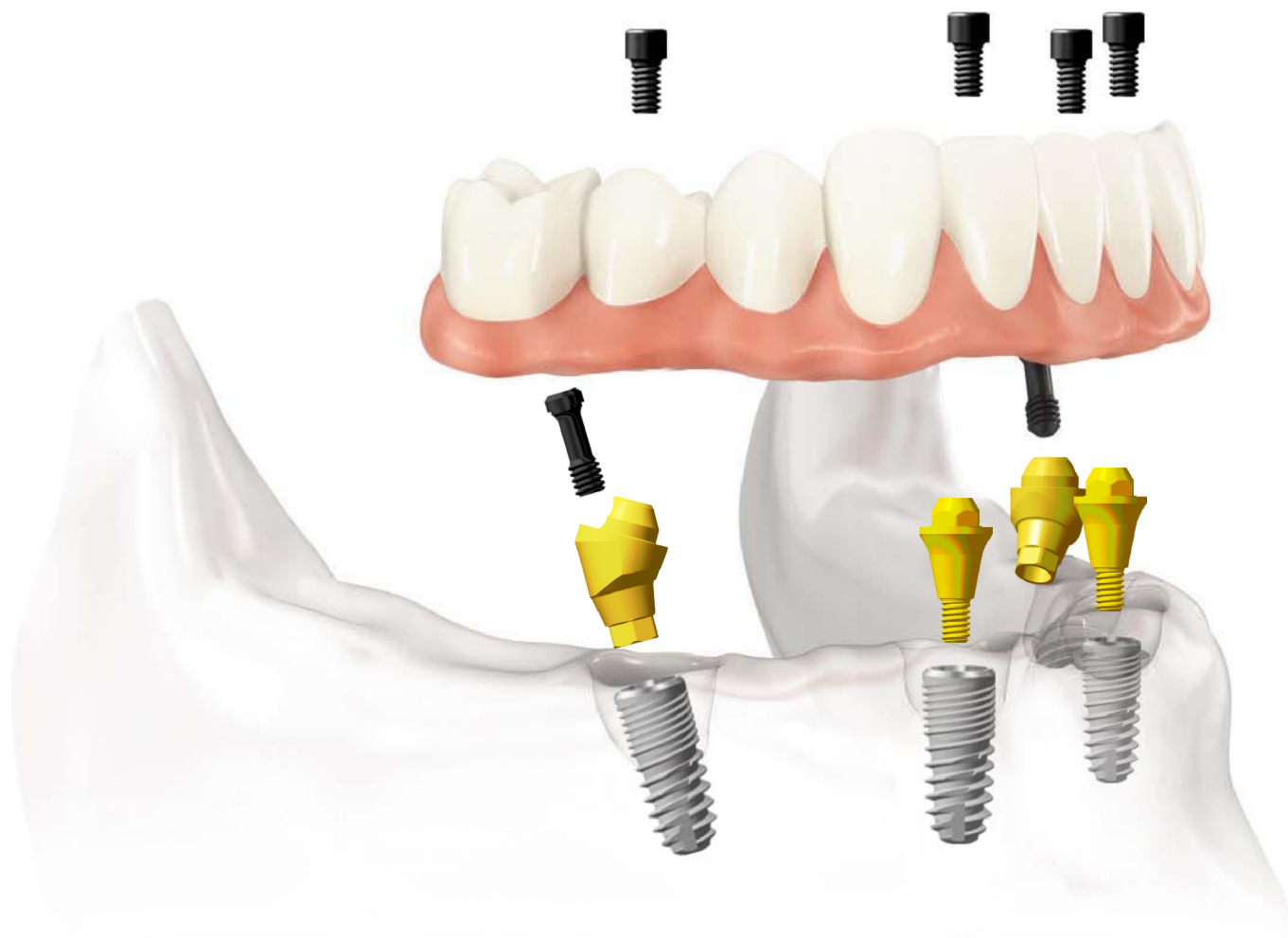


僅供公司內部教育訓練及專業人士參考使用

Pending

Anker
Dental Implant System

Screw Retained Restoration

For Anker Bone Level Implant System

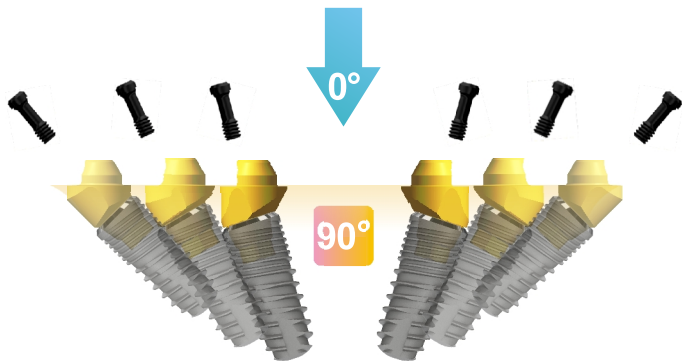

特色

- ◎三種複合式支台齒角度(17度、30度、45度)
可使用在SB-I-II-III
- ◎透過圓筒狀的印模配件精準轉印支台齒位置
- ◎Ti-6Al-4V提供良好的生物相容性與強度
- ◎安裝托桿可輕鬆定位複合式基台

適應症(應用)


- ◎全口臨時贗復物
- ◎全口最終贗復物

① 經過驗證的解決方案

傾斜和軸向有利於植體骨水平。

② 降低骨增生的需求


後方的傾斜植體，可種植較長的植體以增加骨頭與植體的接觸面，避免進行補骨手術。

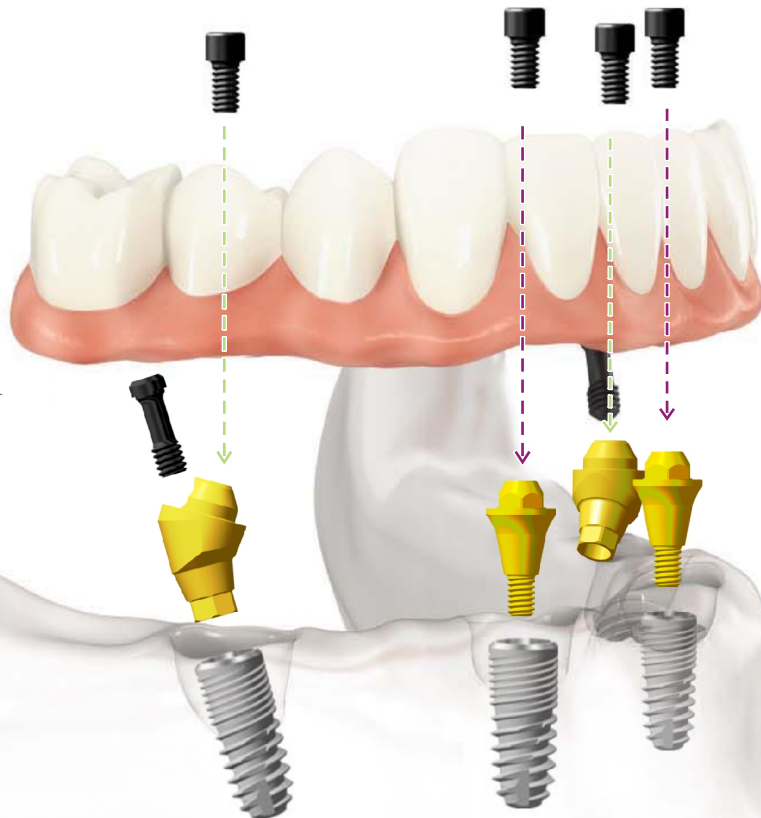

③ 使用4至6支植體可獲得較高的穩定性


傾斜的後牙植體可以被錨定於較高質量的前牙顎骨以減少懸臂長度，可以增強對於修復體的支撐。

Screw Retained Abutment Diagram

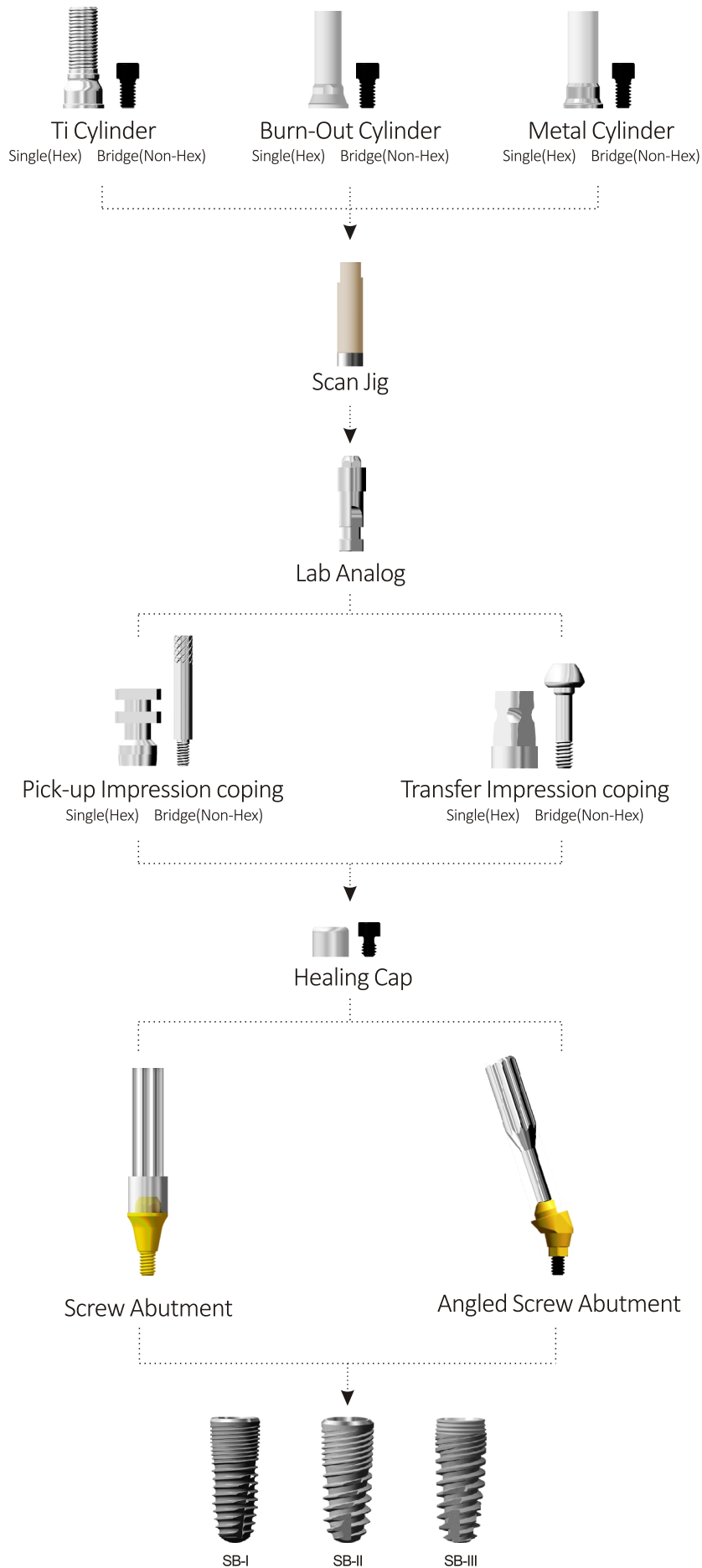

SB-Series (Anker)

Screw Abutment 螺栓固位基台

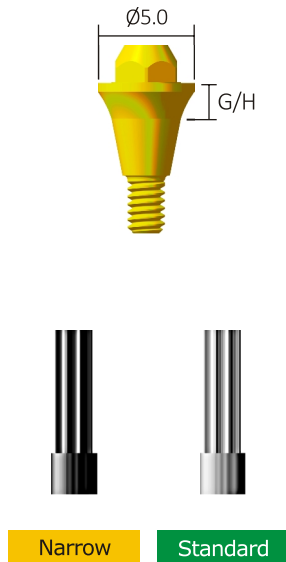


G/H	Narrow(I)	Standard
1.5mm	SBSAN5015(I)	SBSAS5015
2.5mm	SBSAN5025(I)	SBSAS5025
3.5mm	SBSAN5035(I)	SBSAS5035
4.5mm	----	SBSAS5045

- ◎主材質 / Ti6Al4V
- ◎使用說明 / 主要使用在螺栓固位方式的補綴支台齒
- ◎包裝內容物 / Screw Abutment + Abutment Delivery Holder
- ◎內容物已經過滅菌處理
- ◎使用Abutment Torque Driver / Abutment Piece Driver安裝
- ◎建議鎖入扭力 / 35N/cm



Angled Screw Abutment 成角螺栓固位基台

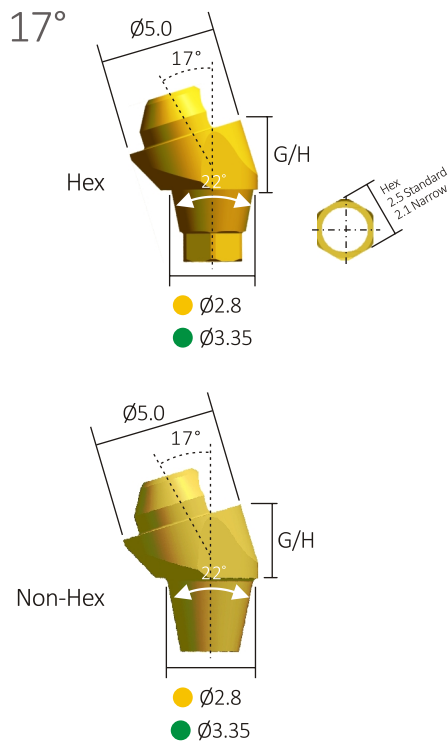


規格 G/H	Narrow(I)		Standard	
TYPE	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
2.5mm	SBASAN502517(I)	SBASAN502517N(I)	SBASAS502517	SBASAS502517N
3.5mm	SBASAN503517(I)	SBASAN503517N(I)	SBASAS503517	SBASAS503517N

- ◎主材質 / Ti6Al4V
- ◎使用說明 / 主要用於成角螺栓固位方式的補綴支台齒
11°Mores Taper有非常安全與緊密的連結角度支台齒可修正醫師植牙的角度
- ◎包裝內容物 / Angled Screw Abutment + Ti Screw + Metal Delivery Holder
- ◎內容物已經過滅菌處理
- ◎使用1.2 Torque Driver / 1.2 Piece Driver安裝，當螺絲開孔需調整至舌側時使用1.2Esthetics Angled Torque Driver / 1.2Esthetics Angled Piece Driver
- ◎建議鎖入扭力 / 25N/cm
- ◎基台角度17°



Screw

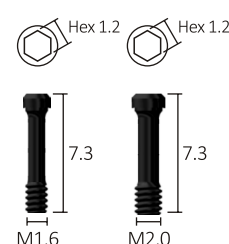


Narrow(I)
SBASASNI
Standard
SBASASS

SB-Series (Anker)

Angled Screw Abutment


成角螺栓固位基台

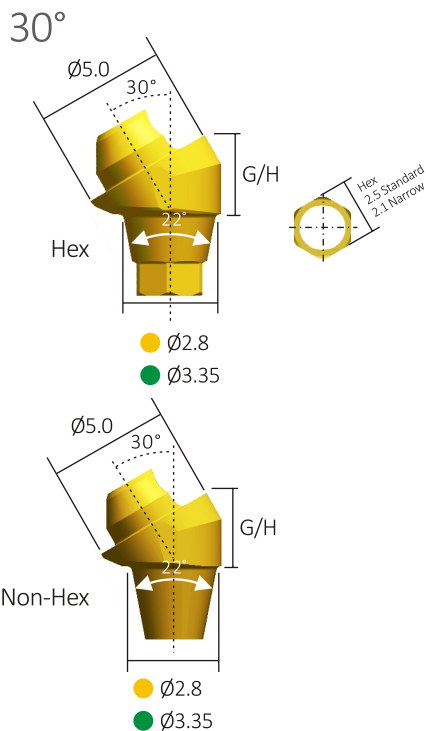


規格 G/H	Narrow(I)		Standard	
TYPE	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
3.5mm	SBASAN503530(I)	SBASAN503530N(I)	SBASAS503530	SBASAS503530N
4.5mm	SBASAN504530(I)	SBASAN504530N(I)	SBASAS504530	SBASAS504530N

- ◎主材質 / Ti6Al4V
- ◎使用說明 / 主要用於成角螺栓固位方式的補綴支台齒
11°Mores Taper有非常安全與緊密的連結角度支台齒可修正醫師植牙的角度
- ◎包裝內容物 / Angled Screw Abutment + Ti Screw + Metal Delivery Holder
- ◎內容物已經過滅菌處理
- ◎使用1.2 Torque Driver / 1.2 Piece Driver安裝，當螺絲開孔需調整至舌側時使用1.2Esthetics Angled Torque Driver / 1.2Esthetics Angled Piece Driver
- ◎建議鎖入扭力 / 25N/cm
- ◎基台角度30°

Screw

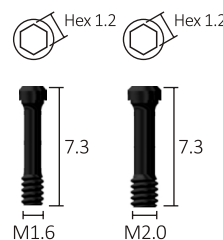


Narrow(I)
SBASASNI
Standard
SBASASS

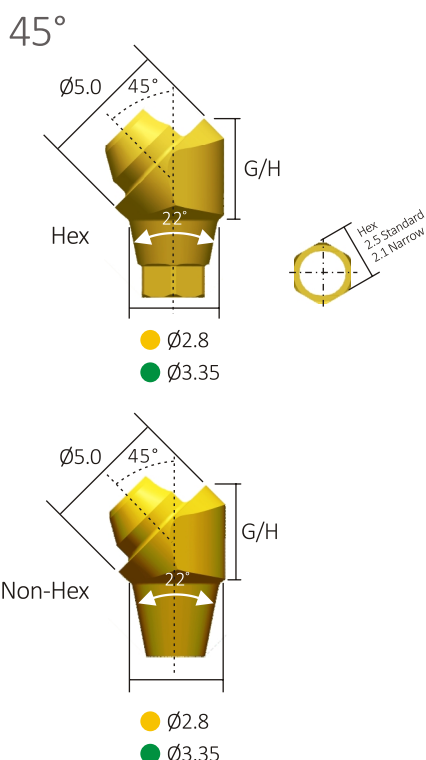


規格 G/H	Narrow(I)		Standard	
TYPE	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
4.5mm	SBASAN504545(I)	SBASAN504545N(I)	SBASAS504545	SBASAS504545N

- ◎主材質 / Ti6Al4V
- ◎使用說明 / 主要用於成角螺栓固位方式的補綴支台齒
11°Mores Taper有非常安全與緊密的連結角度支台齒可修正醫師植牙的角度
- ◎包裝內容物 / Angled Screw Abutment + Ti Screw + Metal Delivery Holder
- ◎內容物已經過滅菌處理
- ◎使用1.2 Torque Driver / 1.2 Piece Driver安裝，當螺絲開孔需調整至舌側時使用1.2Esthetics Angled Torque Driver / 1.2Esthetics Angled Piece Driver
- ◎建議鎖入扭力 / 25N/cm
- ◎基台角度45°

Screw

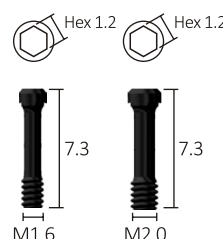


Narrow(I)
SBASASNI
Standard
SBASASS

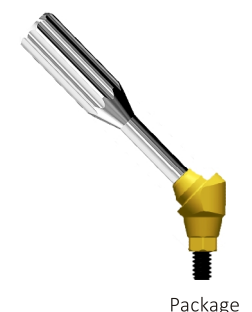

Screw Retained Restoration

Healing Cap


癒合保護蓋

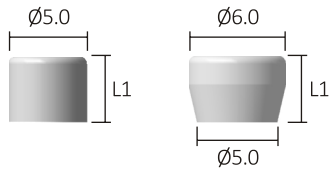

TYPE	L1	REF No.
---	4.15	SBHC5042
Wide	4.15	SBHC6042

- ◎主材質 / PP
- ◎使用說明 / 主要用於製作假牙期間可保護支台齒
- ◎包裝內容 / Healing Cap + Ti Screw
- ◎內容物已經過滅菌處理
- ◎使用1.2 Torque Driver / 1.2 Piece Driver安裝
- ◎建議鎖入扭力 / 15N/cm


Screw

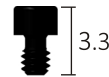

REF No.
SBHCS

Pick-up Impression Coping

Open Tray 開窗式轉移帽

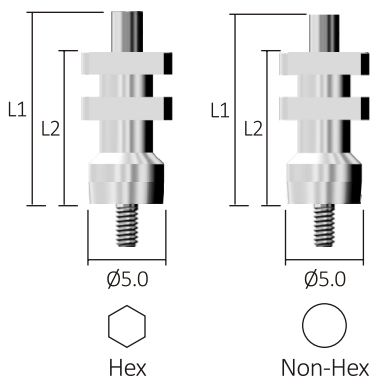


TYPE	L1	L2	REF No.
Hex	15	10	SBPIC5010
Non-Hex			SBPIC5010N

- ◎主材質 / SUS303
- ◎使用說明 / 使用Open-Tray的方式取印模套件
- ◎包裝內容 / Pick-up Impression Coping + Guide Pin
- ◎內容物無滅菌處理
- ◎使用1.2 Torque Driver / 1.2 Piece Driver安裝
- ◎建議鎖入扭力 / 10N/cm
- ◎Hex：可使用在單顆假牙，搭配使用在Screw Abutment
- Non-Hex：可使用在全口假牙使用

Transfer Impression Coping

Close Tray 封閉式轉移帽

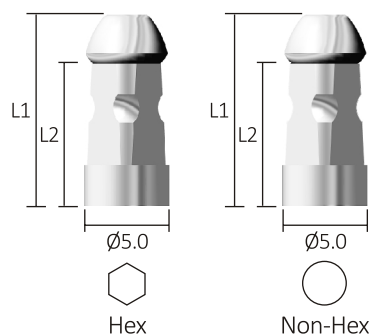


TYPE	L1	L2	REF No.
Hex	10.3	8	SBTIC5008
Non-Hex			SBTIC5008N

- ◎主材質 / SUS303
- ◎使用說明 / 使用Close-Tray的方式取印模套件
- ◎包裝內容 / Transfer Impression Coping + Guide Pin
- ◎內容物無滅菌處理
- ◎使用1.2 Torque Driver / 1.2 Piece Driver安裝
- ◎建議鎖入扭力 / 10N/cm
- ◎Hex：可使用在單顆假牙，搭配使用在Screw Abutment
- Non-Hex：可使用在全口假牙使用

Screw Retained Restoration

Lab Analog


仿支台齒

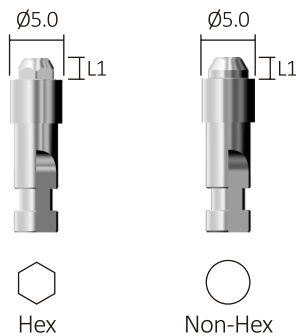

TYPE	L1	REF No.
Hex	2.0	SBLA5020
Non-Hex		SBLA5020N

- ◎主材質 / SUS303
- ◎使用說明 / 主要用於轉印齒模時用來標記口內植體支台齒的位置
- ◎包裝內容 / Lab Analog
- ◎內容物無滅菌處理
- ◎Hex：可使用在單顆假牙，搭配使用在Screw Abutment
- Non-Hex：可使用在全口假牙使用

Scan Jig

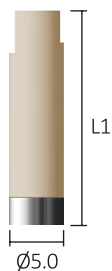


ITEM	L1	REF No.
Scan Jig	15mm	SBASJ15

- ◎主材質 / Ti6AL4V + PEEK
- ◎使用說明 / 1. 主要用於齒模掃描定位用
- 2. 使用在Non-Hex多顆假牙製作
- ◎包裝內容 / Scan Jig
- ◎內容物無滅菌處理
- ◎建議使用手轉動至定位，Scan Jig不晃動即可進行數位掃描

Polishing Protector

拋光保護帽

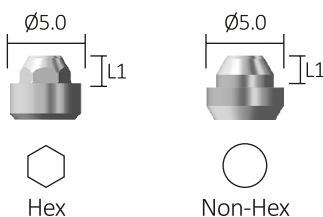


TYPE	L1	REF No.
Hex	2.0	SBPP50
Non-Hex		SBPP50N

- ◎主材質 / SUS303
- ◎使用說明 / 主要用於牙技所修磨多顆牙時保護套
- ◎包裝內容 / Polishing Protector
- ◎內容物無滅菌處理
- ◎Hex：可使用在單顆假牙，搭配使用在Screw Abutment
- Non-Hex：可使用在全口假牙使用

Screw Retained Restoration

Ti Cylinder


鈦基底

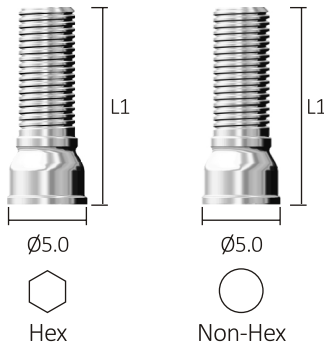

TYPE	L1	REF No.
Hex	12	SBTC500
Non-Hex		SBTC500N


- ◎主材質 / Ti6Al4V
- ◎使用說明 / 主要用於臨時假牙製作配件
- ◎包裝內容 / Ti Cylinder + Ti Screw
- ◎內容物無滅菌處理
- ◎使用1.2 Torque Driver / 1.2 Piece Driver安裝，當螺絲開孔需調整至舌側時使用1.2Esthetics Angled Torque Driver 1.2Esthetics Angled Piece Driver
- ◎建議鎖入扭力15N/cm
- ◎Hex：可使用在單顆假牙，搭配使用在Screw Abutment
- Non-Hex：可使用在全口假牙使用

Screw

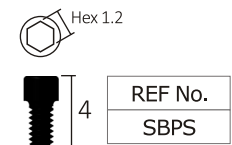

Burn-Out Cylinder


合支台齒塑膠內冠

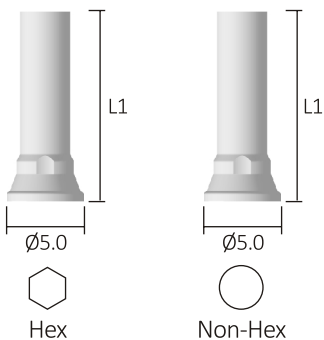

TYPE	L1	REF No.
Hex	12	SBBOC500
Non-Hex		SBBOC500N


- ◎主材質 / POM
- ◎使用說明 / 主要用於牙技塑蠟後，鑄造配件
- ◎包裝內容 / Burn-Out Cylinder + Ti Screw
- ◎內容物無滅菌處理
- ◎使用1.2 Torque Driver / 1.2 Piece Driver安裝，當螺絲開孔需調整至舌側時使用1.2Esthetics Angled Torque Driver 1.2Esthetics Angled Piece Driver
- ◎建議鎖入扭力15N/cm
- ◎Hex：可使用在單顆假牙，搭配使用在Screw Abutment
- Non-Hex：可使用在全口假牙使用

Screw

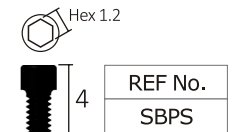

Metal Cylinder


合支台齒金合金內冠

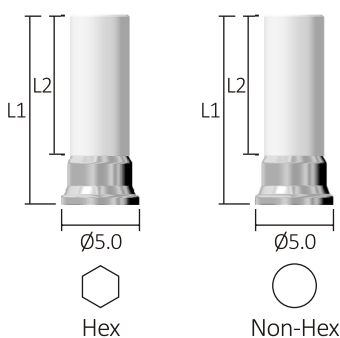

TYPE	L1	L2	REF No.
Hex	11.7	8.7	SBMC500
Non-Hex			SBMC500N

- ◎主材質 / POM / 鈷鉻鉬
- ◎使用說明 / 主要用於牙技塑蠟後，鑄造配件
- ◎包裝內容 / Metal Cylinder + Ti Screw
- ◎內容物無滅菌處理
- ◎使用1.2 Torque Driver / 1.2 Piece Driver安裝，當螺絲開孔需調整至舌側時使用1.2Esthetics Angled Torque Driver 1.2Esthetics Angled Piece Driver
- ◎建議鎖入扭力15N/cm
- ◎Hex：可使用在單顆假牙，搭配使用在Screw Abutment
- Non-Hex：可使用在全口假牙使用


Screw

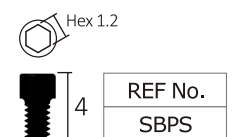

Screw Retained Restoration


Prosthetic Screw

複合式基台鎖固螺絲

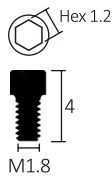

REF No.
SBPS

- ◎主材質 / Ti6Al4V
- ◎使用說明 / 主要用於假牙鎖固使用
- ◎包裝內容 / Prosthetic Screw
- ◎內容物無滅菌處理
- ◎使用1.2 Torque Driver / 1.2 Piece Driver安裝，當螺絲開孔需調整至舌側時使用1.2Esthetics Angled Torque Driver 1.2Esthetics Angled Piece Driver
- ◎建議鎖入扭力15N/cm

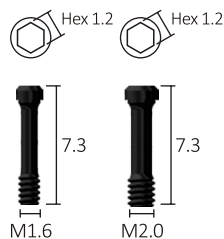


Narrow(I)	Standard
SBASASNI	SBASASS

- ◎主材質 / Ti6Al4V
- ◎使用說明 / 主要用於Angled Screw Abutment鎖固使用
- ◎包裝內容 / Prosthetic Screw
- ◎內容物無滅菌處理
- ◎使用1.2 Torque Driver / 1.2 Hex Piece Driver安裝，當螺絲開孔需調整至舌側時使用1.2Esthetics Angled Torque Driver 1.2Esthetics Angled Piece Driver
- ◎建議鎖入扭力15N/cm


Laboratory Screw

牙技所使用螺絲

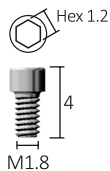

REF No.
SBLS

- ◎主材質 / Ti6Al4V
- ◎使用說明 / 主要用於牙技所鎖固假牙使用
- ◎包裝內容 / Laboratory Screw
- ◎內容物無滅菌處理
- ◎使用1.2 Torque Driver / 1.2 Piece Driver安裝，當螺絲開孔需調整至舌側時使用1.2Esthetics Angled Torque Driver 1.2Esthetics Angled Piece Driver
- ◎建議鎖入扭力15N/cm

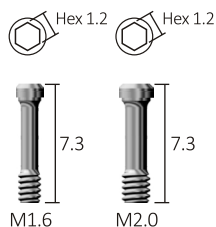


Narrow(I)	Standard
SBALSNI	SBALSS

- ◎主材質 / Ti6Al4V
- ◎使用說明 / 主要用於牙技所鎖固假牙使用
- ◎包裝內容 / Laboratory Screw
- ◎內容物無滅菌處理
- ◎使用1.2 Torque Driver / 1.2 Piece Driver安裝，當螺絲開孔需調整至舌側時使用1.2Esthetics Angled Torque Driver 1.2Esthetics Angled Piece Driver
- ◎建議鎖入扭力15N/cm

Screw Retained Restoration

Screw Retained Prosthetic Kit

Screw Retained 膺復器械盒

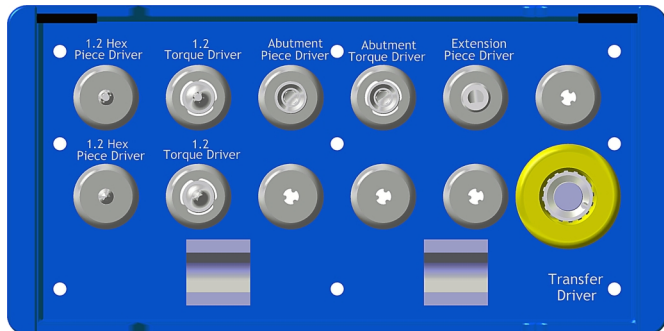

REF No.
SKSB06

1.2 Torque Driver


連接板手螺絲鎖固器械



ITEM	L1	REF No.
1.2 Torque Driver (L)	22mm	ATD12L
1.2 Torque Driver (XL)	26.5mm	ATD12XL OPT

◎主材質 / SUS420
◎使用說明 / 主要用於連接板手鎖固Screw

1.2 Esthetics Angled Torque Driver

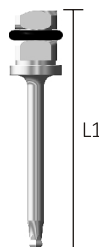


ITEM	L1	REF No.
1.2 Esthetics Angled Torque Driver (L)	22mm	ATD121L
1.2 Esthetics Angled Torque Driver(XL)	26.5mm	ATD121XL OPT

◎主材質 / SUS420
◎使用說明 / 主要用於連接板手鎖固Screw
◎使用螺絲開孔需調整至舌側時使用
◎建議使用扭力不可超過25N/cm

Screw Retained Restoration

1.2 Piece Driver

連接手機Screw鎖固器械

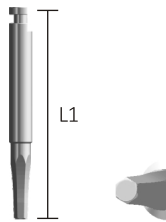


ITEM	L1	REF No.
1.2 Piece Driver (L)	22mm	APD12L
1.2 Piece Driver (XL)	32mm	APD12XL

OPT

- ◎主材質 / SUS420
- ◎使用說明 / 主要用於連接手機鎖固Screw

1.2 Esthetics Angled Piece Driver

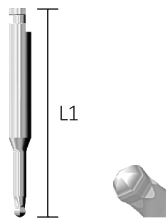


ITEM	L1	REF No.
1.2 Esthetics Angled Piece Driver (L)	26.3mm	APD121L
1.2 Esthetics Angled Piece Driver (XL)	32mm	APD121XL

OPT

- ◎主材質 / SUS420
- ◎使用說明 / 主要用於連接手機鎖固Screw
- ◎使用螺絲開孔需調整至舌側時使用
- ◎建議使用扭力不可超過25N/cm

Abutment Torque Driver

連接板手支台齒鎖固器械

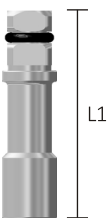


ITEM	L1	REF No.
Abutment Torque Driver (S)	19mm	AATD001S
Abutment Torque Driver (L)	24mm	AATD001L

OPT

- ◎主材質 / SUS420
- ◎使用說明 / 主要用於連接板手鎖固Screw Abutment

Abutment Piece Driver

連接手機支台齒鎖固器械

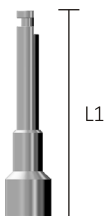


ITEM	L1	REF No.
Abutment Piece Driver (S)	22.5mm	AAPD001S
Abutment Piece Driver (L)	26.3mm	AAPD001L

OPT

- ◎主材質 / SUS420
- ◎使用說明 / 主要用於連接手機鎖固Screw Abutment

Transfer Driver

連接套筒

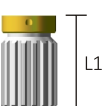

ITEM	L1	REF No.
Transfer Driver	13.5mm	ATD001

- ◎主材質 / SUS420
- ◎使用說明 / 主要用於Torque Driver 轉接為手動的



Screw Retained Restoration

For **Anker** Bone Level Implant System

全球安聯科技股份有限公司

ALLIANCE GLOBAL TECHNOLOGY CO.,LTD

■ 製造廠 | 南部、花東營業處
高雄市路竹區路科五路92號2樓
TEL:07-695-6688 Ext:105/116

■ 台北營業處
台北市中正區忠孝西路一段50號13樓之1
TEL:02-2370-1159 FAX:02-2370-1190

■ 台中營業處
台中市西屯區何南里大墩20街99號5樓之L室
TEL:04-2323-0702

■ 上海分公司 | 聯植醫療器械有限公司
上海市徐匯區桂平路333號6號樓506室
TEL:1891-1796-023



Anker Implant

